



## 直腸用チューブ **エニマCO2カテ** (カテーテルセットK) (DBカテーテルセットK)

**エニマCO2カテ**は、大腸CT検査を行う際に、炭酸ガス送気装置に接続して大腸を二酸化炭素で拡張させるのに適したディスプレイザブルのバルーン付き直腸用チューブ(カテーテルセット)です。

(DBカテーテルセットK)

(カテーテルセットK)



※エアーバッグは、腸管内液状残渣の回収用バッグとしてご利用いただけます。

※エアーバッグからカテーテルまでのチューブの長さが2mのLongタイプ (LカテーテルセットK, DB-LカテーテルセットK)もご用意しております。

### 【警告】

#### 使用方法

- ・二酸化炭素を送気する際は、患者の容態を随時確認しながら慎重に行うこと。[過度の空気又は二酸化炭素の送気は腸管破裂の恐れがある。]
- ・カテーテルを肛門より体内へ挿入する際は慎重に行うこと。[カテーテル先端が腸壁に突き当たり、腸管を穿孔する恐れがある。]

### 【禁忌・禁止】

#### 適用対象 (患者)

- ・腸管に穿孔又はその疑いのある患者、巨大結腸が疑われる患者、憩室のある患者に使用しないこと。[症状の悪化あるいは穿孔を起こす可能性があるため。]
- ・鎌状赤血球貧血又は肺動脈弁閉鎖不全の患者には本品を使用しないこと。[過度の二酸化炭素吸引に関連する代謝不均衡のリスク増加を引き起こす可能性がある。]

#### 併用医療機器

- ・本品の使用はMRI (磁気共鳴画像診断装置) による検査を行わないこと。[MRIの高周波電磁場の影響で金属部分が局所高周波加熱を引き起こし、患者に火傷等を及ぼす恐れがある。]

#### 使用方法

- ・再使用禁止。
- ・バルーン拡張には空気以外を使用しないこと。[バルーン拡張に生理食塩水や造影剤等を用いると、成分の凝固に伴いバルーンルーメンが閉塞し、抜水ができなくなる恐れがある。]

使用上の注意等の詳細は添付文書をご参照ください。

【使用方法】


(例) 大腸CT検査の際に自動炭酸ガス送気装置『エニマCO2』にカテーテルセットKを接続して用いた場合

- ①『エニマCO2』にカテーテルセットKを接続する。『エニマCO2』には予め二酸化炭素を注入した容器等を接続し、適切に準備しておく。
- ②エアバッグをカテーテルより下方に位置させる。
- ③適切な潤滑剤をカテーテル及びバルーンに塗布する。
- ④エアバッグチューブAのクランプは閉じ、エアバッグチューブBのクランプは開けた状態で患者の肛門からカテーテルを挿入する。挿入は慎重に行い、デプスマークにより深度を確認する。
- ⑤バルーンが完全に直腸内に挿入されたことを確認後、シリンジに空気を満たし、バルブに接続し、固定して注入する。空気注入後、シリンジは取り外す。
- ⑥バルーンを拡張後、バルーンの近位端を肛門括約筋の位置に保持する。
- ⑦エアバッグチューブAのクランプを開き、送気を開始する前に体位変換等を行って腸管内の水様性残渣をエアバッグに回収する。
- ⑧送気を開始する。以下、標準的な操作方法でCTの撮影を行う。
- ⑨手技が完了し、送気停止後『エニマCO2』から取り外し、大腸の拡張を軽減する。
- ⑩バルブにシリンジを接続し、空気を抜いてバルーンを完全に収縮させる。
- ⑪患者から本品を抜去し、クランプを閉じ「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に沿って廃棄処理する。

※DBカテーテルセットKについては添付文書をご参照ください。


【形状】

\*カテーテルセットKの直腸カテーテル部分

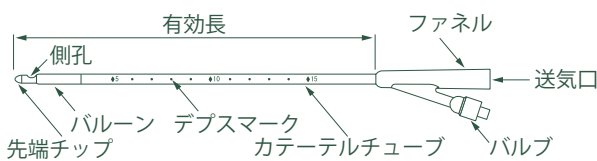


サイズ呼称	有効長	カテーテル外径	バルーン規定容量
14Fr	175mm	4.7mm	10mL

\*DBカテーテルセットKの直腸カテーテル部分

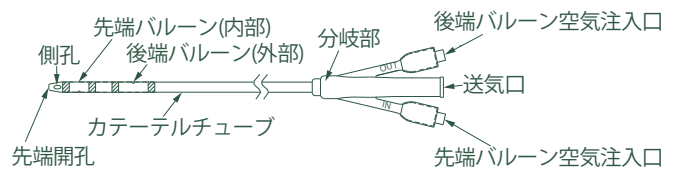

サイズ呼称	有効長	カテーテル外径	バルーン規定容量	
			先端バルーン	後端バルーン
18Fr	190mm	6.0mm	12mL	12mL

・カテーテルセットK、DBカテーテルセットK

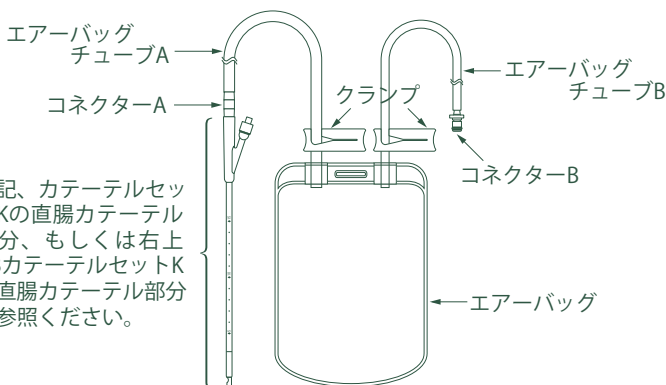

\*上記、カテーテルセットKの直腸カテーテル部分、もしくは右上DBカテーテルセットKの直腸カテーテル部分を参照ください。

- エアバッグ : 容量 約750mL
- エアバッグチューブA : 外径10mm 長さ500mm(Longタイプは2000mm)
- エアバッグチューブB : 外径 7mm 長さ1500mm

【包装】

12本/箱

種類	タイプ	品目コード
カテーテルセットK	シングルバルーン	880-080-2001
LカテーテルセットK	Longチューブ、シングルバルーン	880-080-2005
DBカテーテルセットK	ダブルバルーン	880-080-2004
DB-LカテーテルセットK	Longチューブ、ダブルバルーン	880-080-2006

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

〈製造販売業者〉  
九州クリエートメディック株式会社  
〒804-0077 福岡県北九州市戸畑区牧山海岸2-48  
業態許可番号：40B1X10005  
電話番号：093-882-1750

〈製造業者〉  
九州クリエートメディック株式会社

発売元



堀井薬品工業株式会社

〒540-0038 大阪市中央区内淡路町1-2-6

TEL 06-6942-3481(代) FAX 06-6942-1505  
http://www.horii-pharm.co.jp

7X0319H

営業所	TEL	FAX	営業所	TEL	FAX
札幌	011-812-2640	011-812-9273	東京北	048-663-9491	048-663-9492
仙台	022-221-3047	022-221-1981	名古屋	052-331-7960	052-331-7965
東京中央	03-6658-4380	03-3622-9950	近畿	06-6942-3484	06-6943-0650
東京西	042-466-1688	042-466-1689	広島	082-281-2889	082-281-2970
東京城南	042-753-3991	042-753-8593	福岡	092-864-5978	092-864-5758